


## Segítség E-mailben küldött CT felvétel megnyitásához!

Indítsuk el az I-Cat Vision programot a számítógépünkön, a képernyő bal felső sarkán kattintsunk a TOOLS fülre. A megjelent ablakban kattintsunk a SETUP szövegre, mire megjelenik egy másik ablak. A megjelent ablak felső fehér mezőjében leolvashatjuk annak mappának a nevét, ahol a VISION keresi a felvételt. ( Ennek az elnevezése legtöbbször C:\ImageRoot). Most kattintsunk a megkapott felvételre és csomagoltassuk ki ebbe a mappába.

Zárjuk be és ismét nyissuk meg az iCat Vision programot, melyben már a letöltött felvételen szereplő páciens neve is megjelenik

### Tools – setup

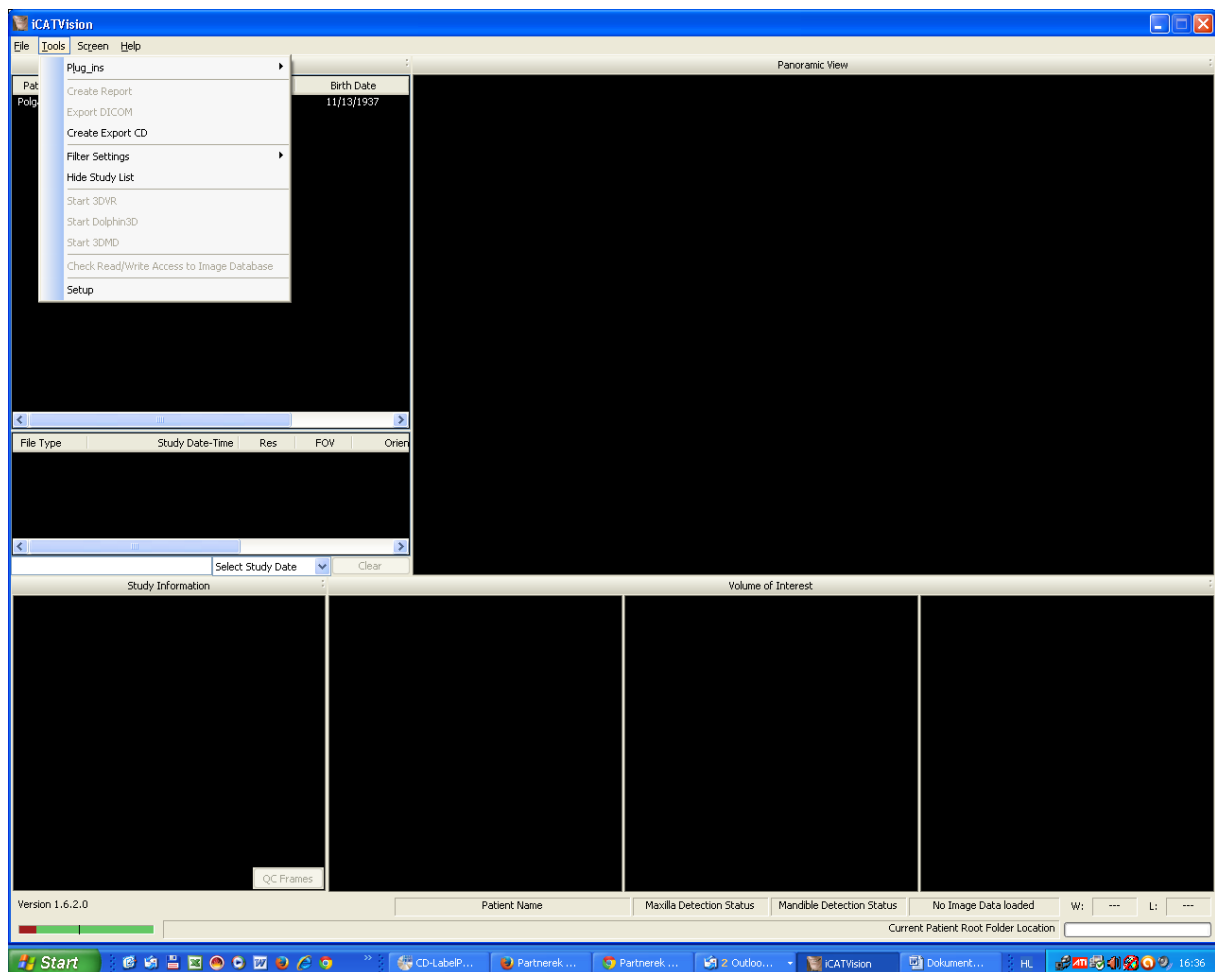

Melynél az alábbi ablakot kapjuk meg:

