


Tisztelt Doktor N /Úr, Kedves Kolléga!

**VIP DENTAL RÖNTGEN CENTRUM ÜDVÖZLI ÖNT ÉS SOK SIKERT KIVÁN A PÁCIENSÉR L KÉSZÜLT A KIS TÉRFOGATÚ DIGITALIS VOLUMENTOMOGRÁFIAI (CBCT) FELVÉTEL HASZNÁLATÁHOZ! A GYÁRTÓ ÚJABB DIAGNOSZTIKAI PROGRAMOT FEJLESZTETT KI, AMELY A VIP BUDA KODAK BERENDEZÉSÉRE IS TELEPÍTÉSRE KERÜLT. AZ ÚJ VERZIÓ TÖKÉLETES ÉS GYORS TELEPÍTÉSÉHEZ SZERETNÉNK SEGÍTSÉGET NYÚJTANI ÖNNEK EZZEL A KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT ÚTMUTATÓVAL.**



### Az új program telepítése

A CD automatikusan elindul számítógépén, ennek jele lesz ez a kis felugró ablak.


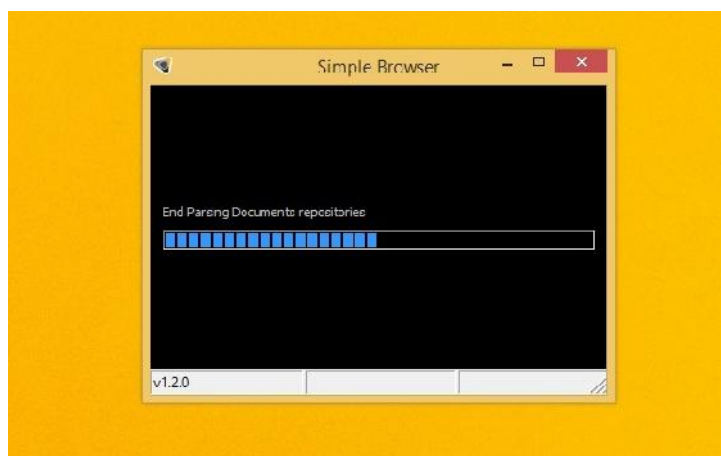


A program két lehetőséget kínál fel:


1. „**Open a Volume**” → a felvétel megnyitása a CD-ről (ilyenkor a 3D nézet nem használható)
2. „**Install application**” → az új program telepítése

Az egyes számítógépek eltérő beállításai következtében az új program automatikus telepítése nem minden esetben vezetett sikerre, ezért készítettük ezt a bemutatót, hogy bármely felhasználó könnyen megbirkózhasson ezzel a feladattal.


Arra kérjük, a nyílal jelzett helyre kattintva kapcsolja ki a programot.

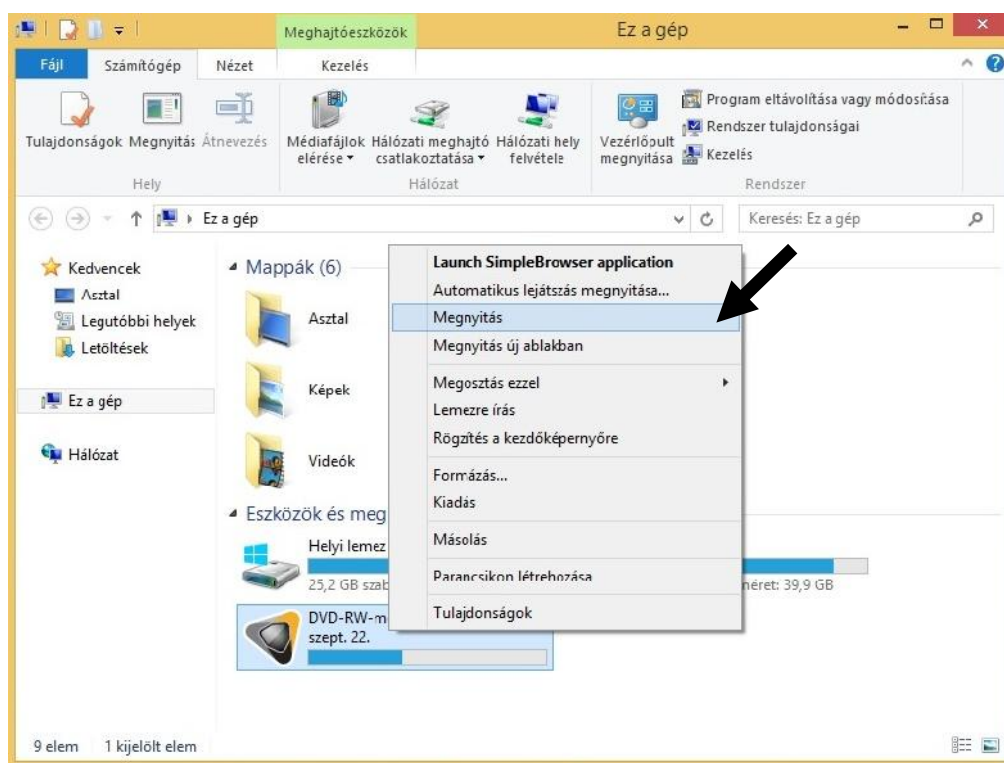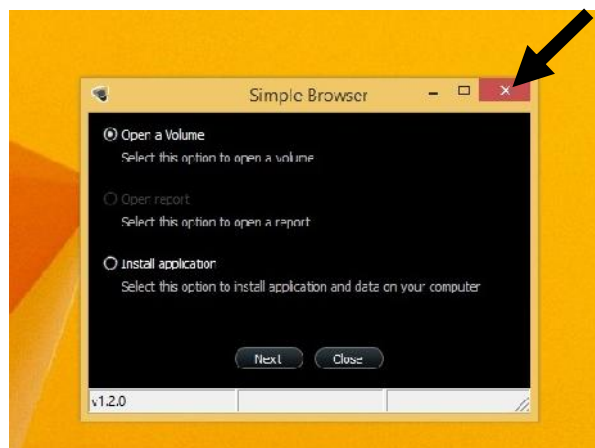

Ezt követően keresse meg számítógépe **CD/DVD-meghajtóját** („Sajátgép” vagy „Ez a gép” mappában), majd kattintson rá a **jobb** egérgombbal. A felugró ablakban válassza a „**Megnyitás**” funkciót a **bal** egérgombbal (nyíl).

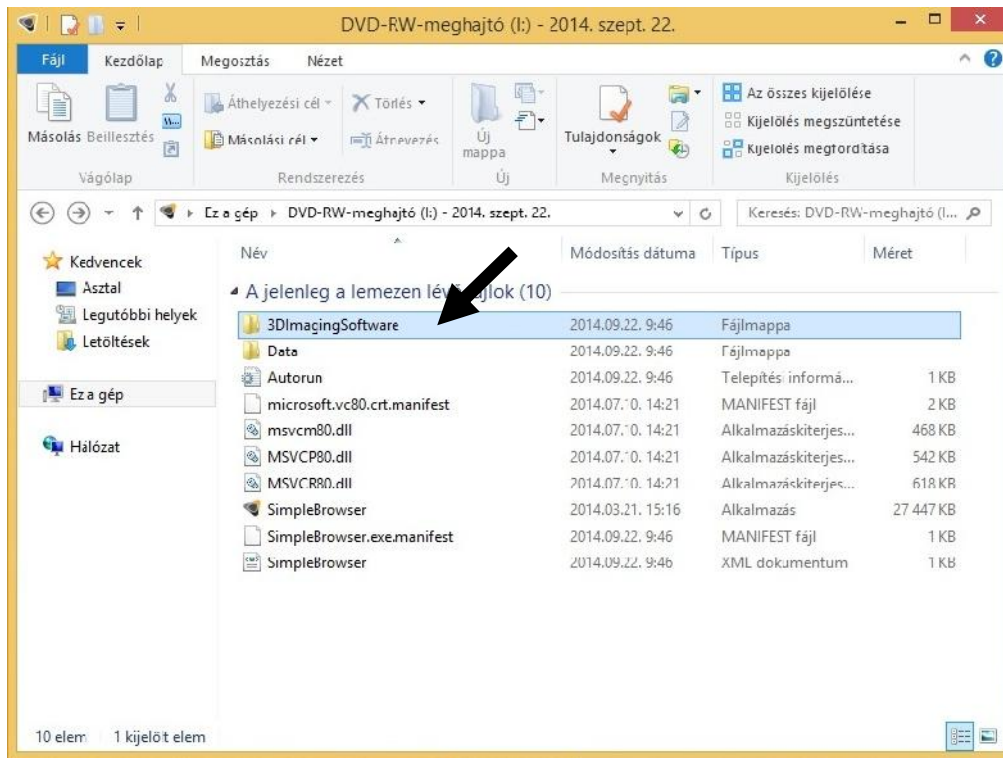


Most a CD-re kiírt mappákat látja. Nyissa meg a „3DImagingSoftware” mappát (nyíl).

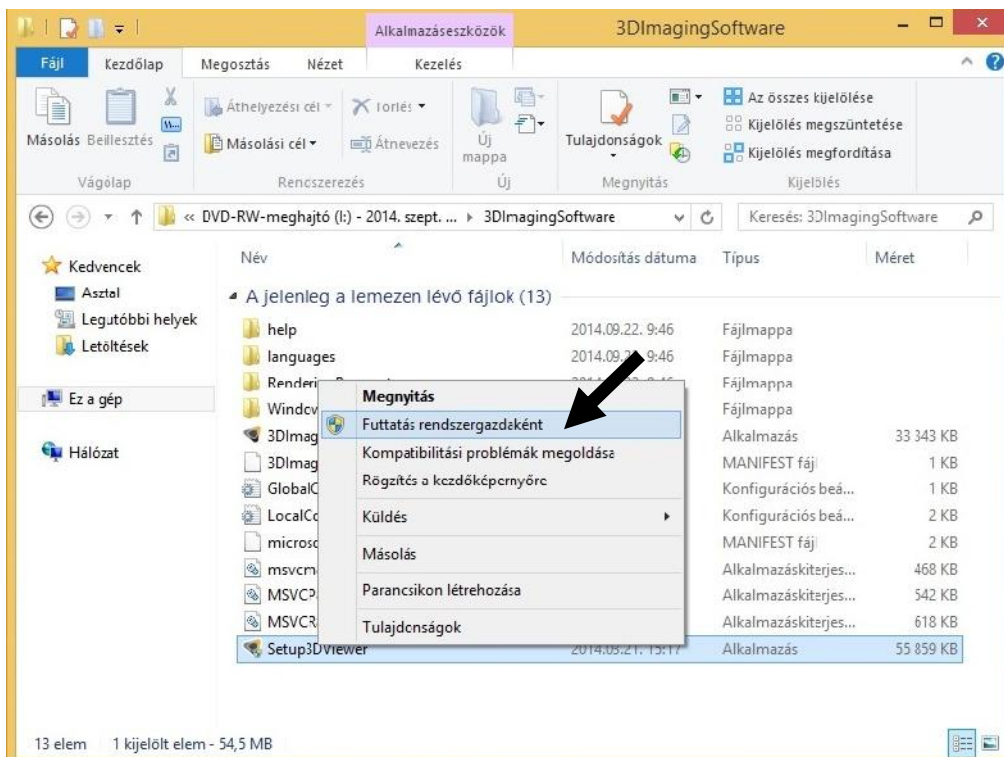



Kattintson **jobb** egérgombbal a „Setup3Dviewer”-re (nyíl), és az el ugró ablakban válassza a „Futtatás rendszergazdaként” funkciót.

Következ lépésben engedélyezze, hogy telepítendő **CS 3D Imaging Setup** program módosításokat hajtson végre a számítógépen, majd az alábbi új, automatikusan megjelenő ablakban folytassa a program telepítését → „NEXT”.

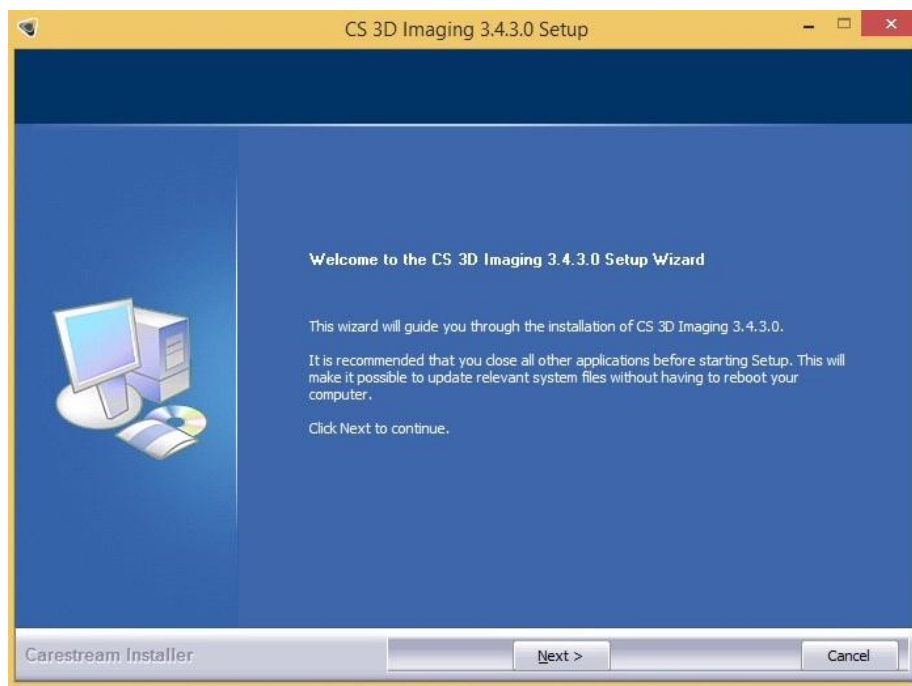


Válassza a „Dental” beállítást (nyíl), majd ismét „NEXT”.

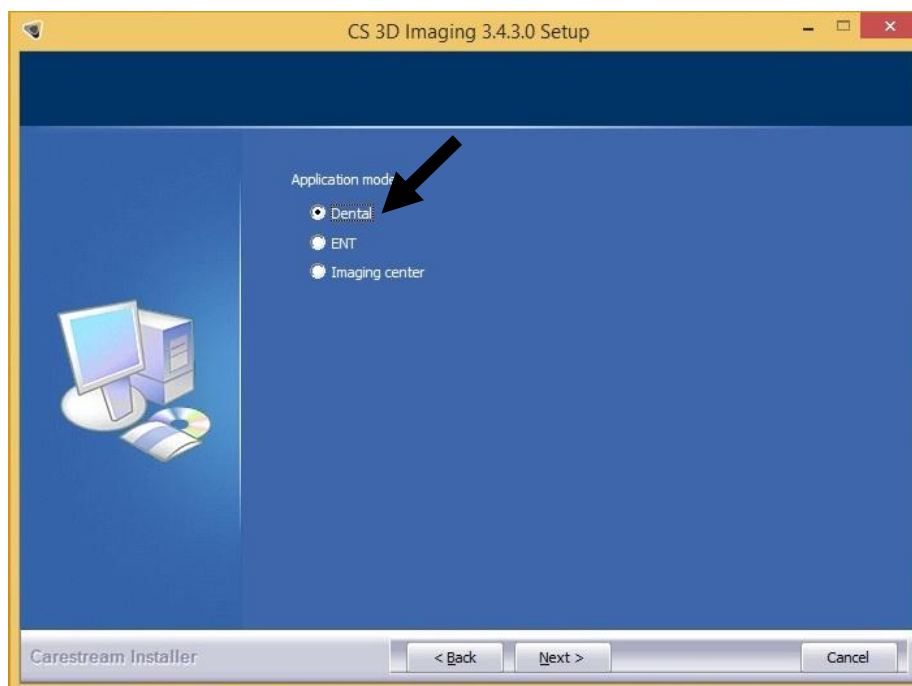


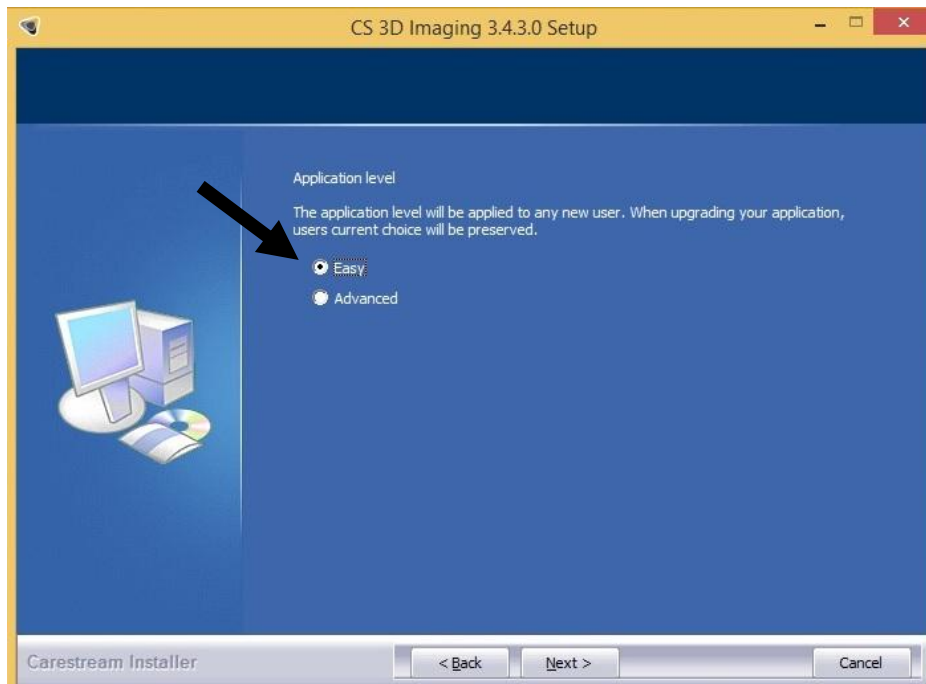


Bal egérgombbal kattintson az „Easy” felíratra (nyíl), majd ismét „NEXT”.

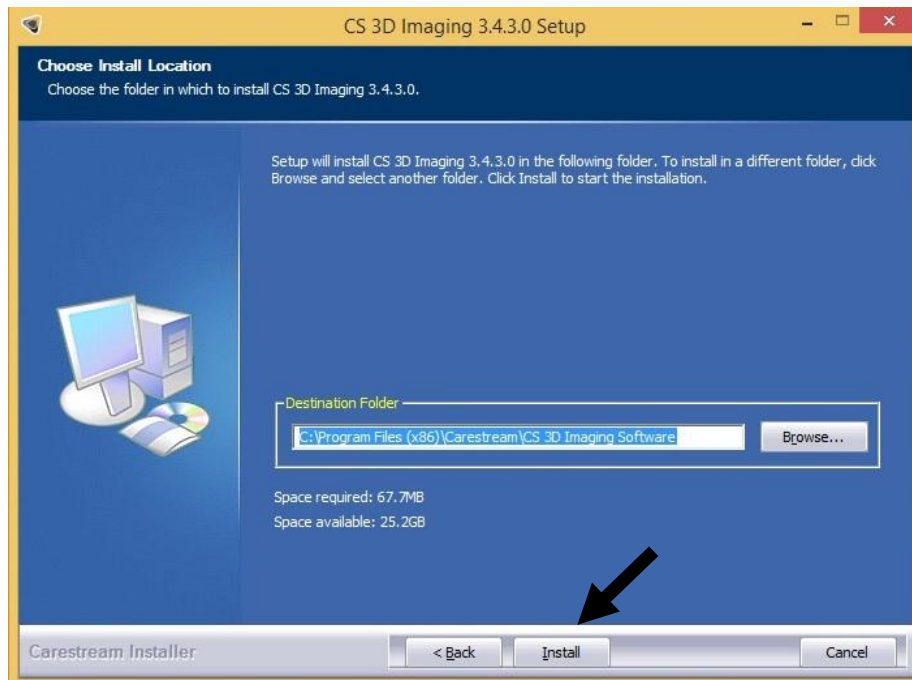

Következ lépésben alul kattintson az „Install” felíratra (nyíl).

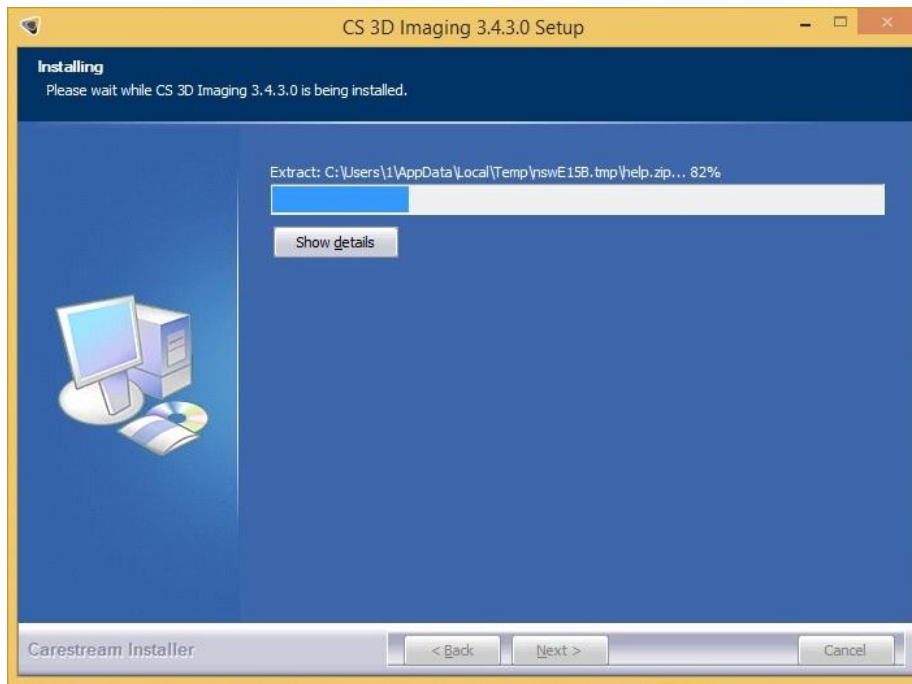


Folytatódik a telepítés.

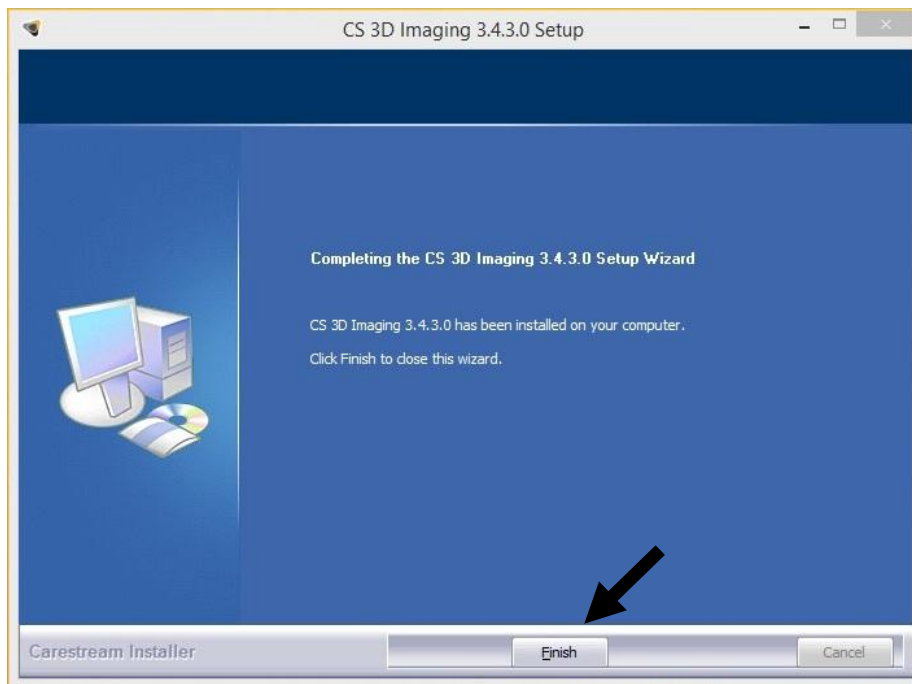


Végül kattintson alul a „Finish” feliratra (nyíl), ezzel a program telepítése sikeresen befejezött, megjelent a parancsikön.




## CBCT-felvételek betöltése CD-r 1 az új telepített programba

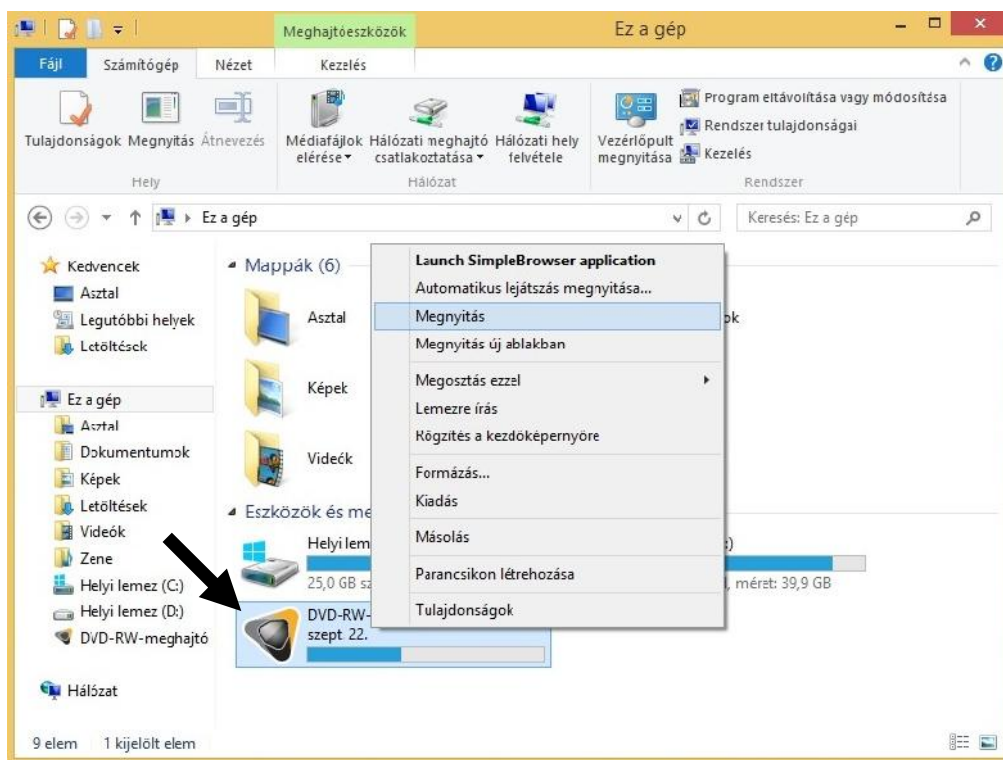


A már korábban leírtak alapján a **jobb** egérgombbal kattintson a **CD/DVD-meghajtó** ikonra (nyíl), mely a „Sajátgép” vagy „Ez a gép” mappában található. A felugró ablakban válassza a „**Megnyitás**” funkciót a **bal** egérgombbal.

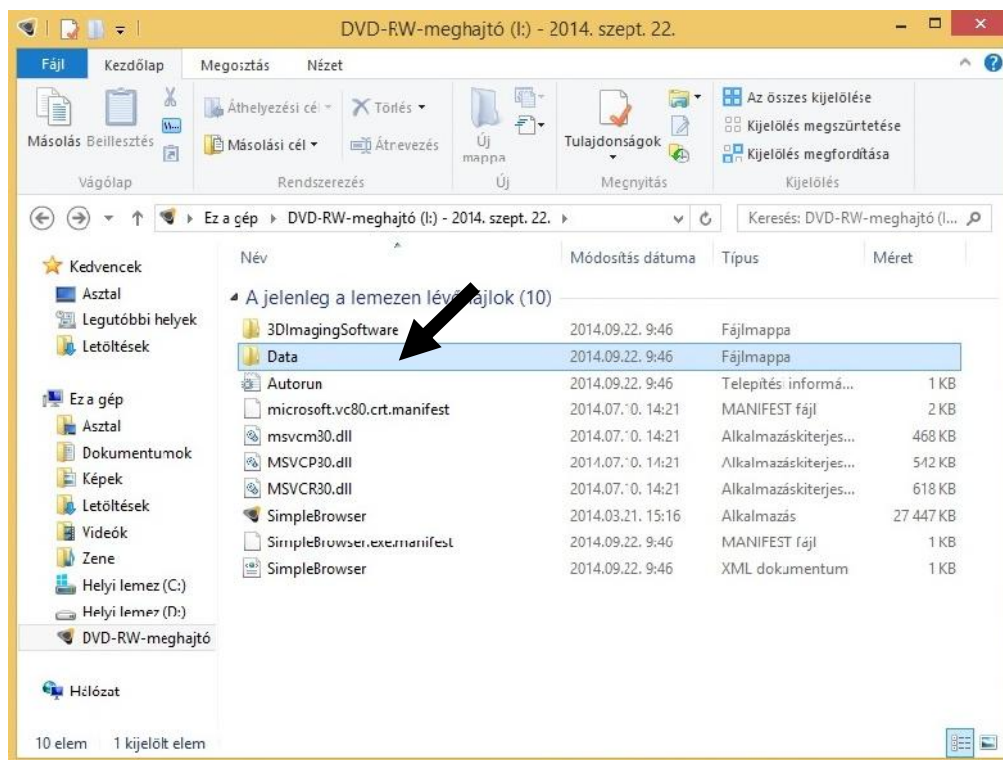

Lépjen be a „**Data**” mappába (nyíl).

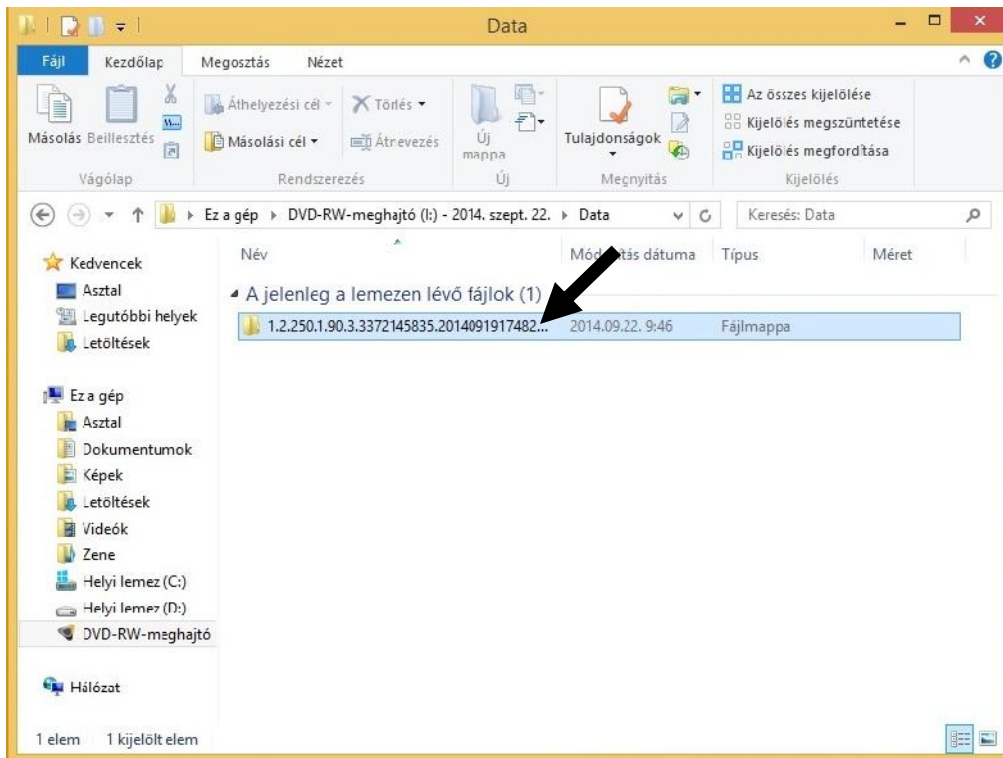

Ezt követően a következő - számsorral - jelzett mappába is lépjen be (nyíl).

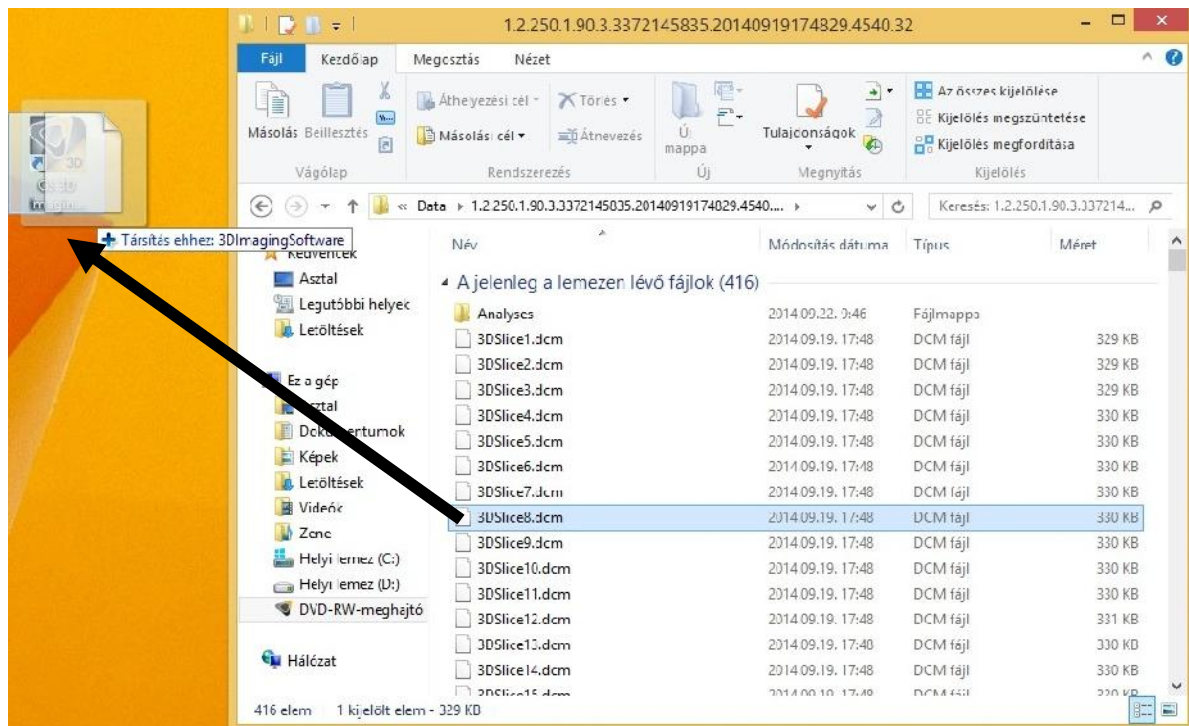

majd a **bal** egérgombbal húzza rá az egyik **dcm** fület a parancsikorra (nyíl). Ezt követően a program valamennyi funkciójával elindul.

A program kezelése egyszerű, könnyen áttekinthető kezdő felhasználók részére is. Az értékeléshez sok sikert kívánunk!

A VIP DENTAL Röntgen Centrum munkatársai várják kérdéseiket.